

Hanil7 セット内容

本体

サイドテーブル

カップ保持用シリコン固定用リング

※本体にセット済みです。

×1

固定用ネジ



接続組立カバー

カップホルダー


取付ポール調整用
シリコンリング

⑤ 固定用ネジでしっかりと固定します。

④ ポールに適したシリコンリングをはめ
位置合わせピンを穴に差し込み仮組します。

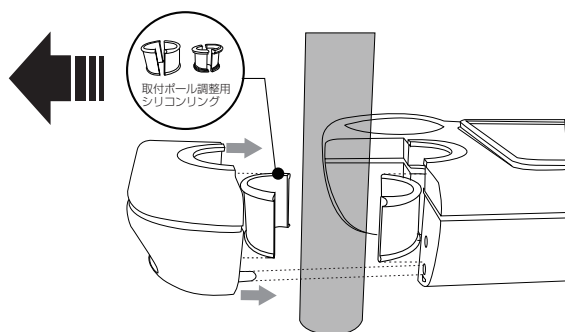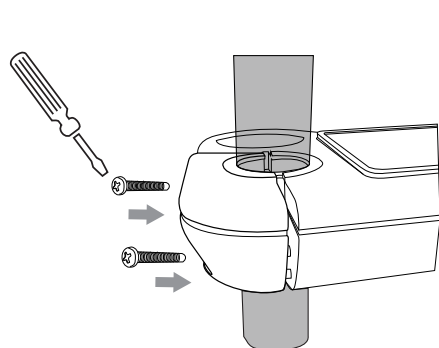


⑥ 接続組立カバーを閉じます。

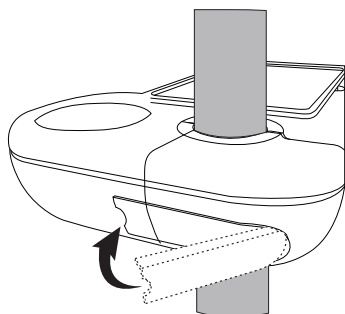


Hanil7 カップホルダーの設置

① 図のように上から紙カップを挿入し
ます。(最大30個設置可)

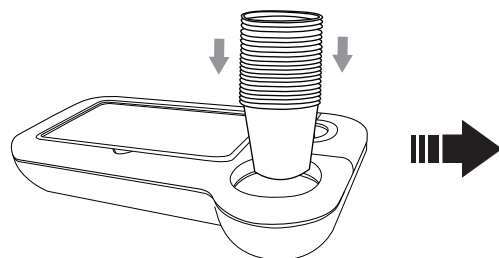


② 紙カップの上面からカップホルダーを
被せます。

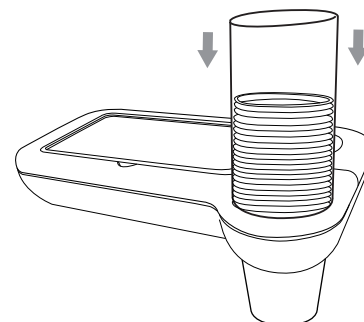


Hanil7 本体の設置

① ユニットのポールに本品を設置する
位置を決めます。

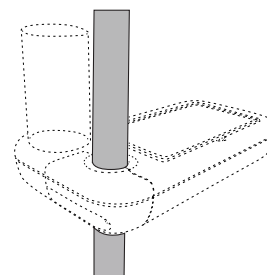

② 設置の前に本体から接続組立カバーを開
け、本体と接続されているパーツの位置
と向きを確認してください。(図参照)

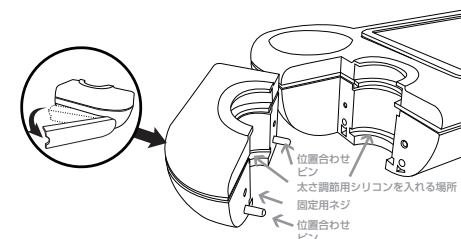


③ 設置するポールに合うシリコンリングを
選びます。

取付ポール調整用シリコンリングの選定

ポール径	シリコンサイズ・数
39mm	小 
42mm	大×2 
44mm	大×1 

※上記以外のポール径の場合は、
ご自身でスペーサー等で調整してください。

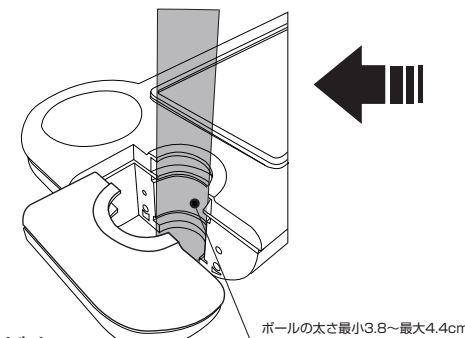

紙カップを保持するシリコンゴムは消耗品です。
使用中に複数個カップが出てくるようになった
場合は新しいリングと交換してください。

同じ5オンス紙カップでもメーカーによっては
初回から複数個出てくる場合がございます。
その場合はシリコンリングを2枚重ねてご使用
ください。

カップ保持用シリコンリング (消耗品)


標準価格 1 ケ 1,000円



ティッシュとテーブルの設置



① 天板の蓋を開け

厚みの薄いサイズのティッシュBOX
(約7cmまで)を収納する場合。

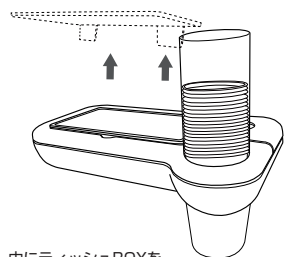

天板の蓋を閉め、サイドテーブル
として使用します。


② 中にティッシュBOXを
入れます。

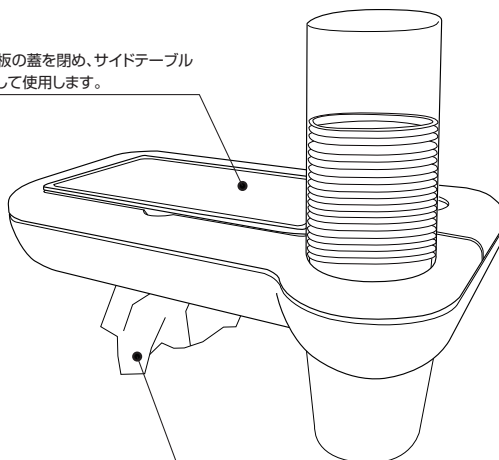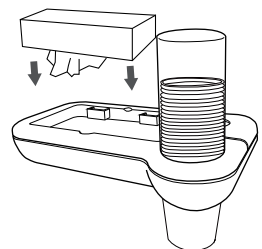

ティッシュは下から引っぱって使用します。


厚みのあるサイズのティッシュBOX
(約15cm)を収納する場合。

①

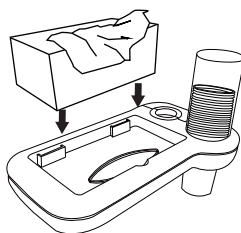

天板をティッシュBOXのサイドに設置し、
サイドテーブルとしてご使用頂けます。

②

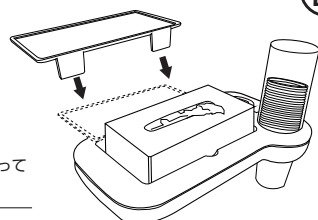

ティッシュは上から引っ張って
使用します。

2017.08.05改定

BSA

3way ディスペンサー
ハニルセブン

HANIL7[®]

カップディスペンサーとして



ユニットごとにあれば無駄
な動きが無くなります。


ティッシュ
BOXとして




患者様の手に取りやすい場所へ
の設置は好感度UPのヒケツです。

ハニル7
3つの
ベンリ

サイドトレイとして

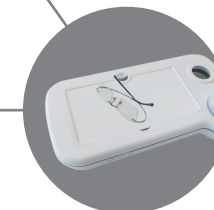

インスツルメント、小器械、患者様の
眼鏡などの小物を置いて頂けます。

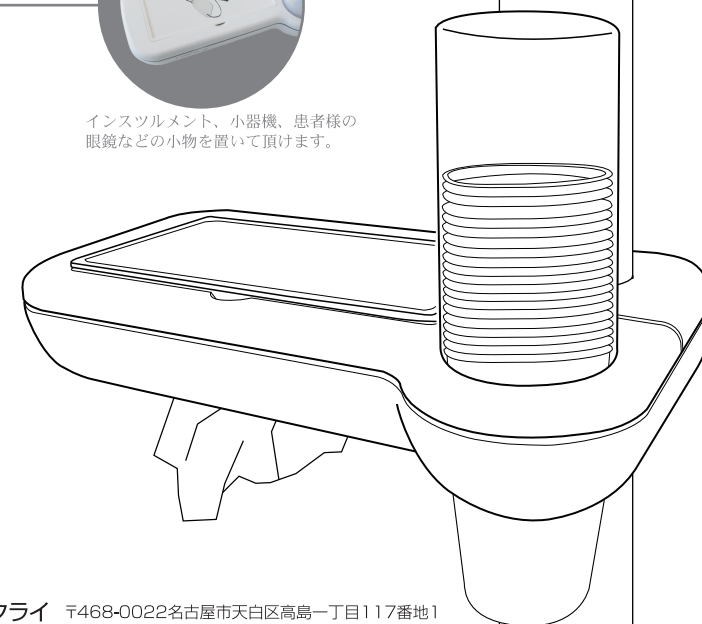

[発売元]株式会社ビーエスエーサクライ 〒468-0022名古屋市天白区高島一丁目117番地1

TEL.052-805-1181 FAX.052-805-1182